

Ficha Técnica - SANRO LIS



Descrição

Luva confeccionada em látex de borracha natural, interior acabamento interno com leve adição de pó bioabsorvível e palma com superfície lisa. Punhos com bordas. Estéril.

Atributos

Luvas de látex de 100% borracha natural e levemente lubrificadas com pó bioabsorvível de amido de milho. Esterilizadas pelo processo Raio Gama cobalto 60 e validade 3 anos. Ótima sensibilidade tátil, maleabilidade, resistência, segurança e facilidade no calçamento.

Aplicações

Indicada como proteção das mãos do usuário e do paciente em área médico-hospitalar, principalmente em cirurgias.

Especificações Gerais

| | |
|---------------------|-------------------|
| Modelo | SANRO LIS |
| Material | Látex Natural |
| Acabamento Na Palma | Superfície Liso |
| Acabamento Interno | Leve adição de pó |
| Formato | Anatômico |
| Cor | Natural |
| Comprimento | 28 cm |
| Espessura | 0,24 mm |
| Esterilização | Estéril |

Tamanhos disponíveis e códigos

| Tamanho | Código | EAN | DUN 14 |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 6.0 | 387900002 | 7896243101115 | 17896243101112 |
| 6.5 | 388900002 | 7896243101139 | 17896243101136 |
| 7.0 | 389900002 | 7896243101153 | 17896243101150 |
| 7.5 | 390900002 | 7896243101177 | 17896243101174 |
| 8.0 | 391900002 | 7896243101191 | 17896243101198 |
| 8.5 | 392900002 | 7896243151462 | 17896243151469 |

Embalagem

embalada individualmente
caixa com 200 pares

Certificação

| | |
|---------------|-------------------------------|
| CA | 4343 |
| CAD. ANVISA | 10170480014 |
| RESP. TÉCNICO | ANGELINA M.C.L. MEDINA |
| CRQ | 4.110.366 |
| ICEPEX | Nº CE-LVL/ICEPEX-N 00024-05-1 |

Ficha Técnica - SANRO LIS



INSTRUÇÕES DE USO:

Para abrir a embalagem externa de forma asséptica, de cima para baixo, seguindo as setas indicativas contidas na embalagem;
Abrir o envelope interno (papel grau cirúrgico), desdobrando com as pontas dos dedos;
Pegar pela face interna uma das luvas e vestir a mão oposta;
Com a mão ainda despida, pegar a outra luva também pelo punho e enfiar os dedos das mãos já calçadas na dobra do punho, e pela face palmar, calçar a outra mão;
Com ambas as mãos calçadas, ajustar as luvas. Primeiro ajustando os dedos e depois cobrir o avental cirúrgico com o punho da própria luva, ajustando a virola.

CONSERVAÇÃO DO PRODUTO:

Proteja este produto do calor, umidade e luz.

CUIDADOS:

Produto de uso único / destruir após o uso / proibido reprocessar

Observações

Validade: 3 anos da data de fabricação enquanto a embalagem não for aberta danificada ou molhada.

Atenção: Este produto contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.



**FÁBRICA DE ARTEFATOS
DE LÁTEX SÃO ROQUE LTDA.**

MATRIZ: Av. 3 de Maio, 307 - São Roque/SP - CEP 18134-000 - CNPJ: 70.939.574/0001-05

FILIAL: Rua Horácio Manley Lane, 440 - Área 1 - Bairro Marmeleiro - São Roque/SP

CEP 18131-770 - CNPJ: 70.939.574/0002-96

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

www.luvassanro.com.br

e-mail: latex@latexsr.com.br

0800 721 8505 / Fone: (11) 4713-5000

Caixa Postal: 1750 - CEP: 18130-971 - São Roque/SP

Para maiores informações, consulte o nosso site: www.luvassanro.com.br






SEPARE AS ABAS E PUXE PARA ABRIR

LUVAS CIRÚRGICAS DE LÁTEX DE BORRACHA NATURAL

ESTÉREIS - LUBRIFICADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL
SUPERFÍCIE LISA - FORMATO ANATÔMICO - DEDOS CURVOS

SanroLis
PROIBIDO REPROCESSAR
ESTERILIZAR APÓS O USO
PRODUTO DE USO ÚNICO

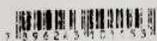

TAM.: **7.0 INT 2**
 REFERÊNCIA: **389900002**
 FAB. / EST. EM: **05/2020**
 LOTE: **123203**
 CÔD. BARRAS:  7 896243 011133 5

CONTÉM
1
PAR.



C.A. 4343 - CAD. ANVISA Nº 10170480014 • RESP. TÉCNICO: ANGELINA M.C.L. MEDINA - CRQ 04.110.366

ESTERILIZADAS PELO PROCESSO RAJO GAMA COBALTO 60 - A VALIDADE E ESTERILIDADE DESTES PRODUTOS ESTÃO ASSEGURADAS POR 03 ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, ENQUANTO A EMBALAGEM NÃO FOR ABERTA, DANIFICADA OU MOLHADA. APÓS CALÇADA, REMOVER O EXCESSO DE PÓ BIOABSORVÍVEL COM UMA TOALHA ESTÉRIL UMEDECIDA. **CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ.**

ATENÇÃO: ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL. SEU USO PODE CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS AO LÁTEX.

FÁBRICA DE ARTEFATOS DE LÁTEX SÃO ROQUE LTDA,
INDÚSTRIA BRASILEIRA

MATRIZ
AV. 3 DE MAIO, 307
SÃO ROQUE / SP - CEP 18134-000
CNPJ 70.939.574/0001-05

FILIAL
RUA HORÁCIO MANLEY LANE, 440 - ÁREA 1
B. MARMELEIRO - SÃO ROQUE/SP - CEP 18131-770
CNPJ 70.939.574/0002-96

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800.7218505
CAIXA POSTAL: 1750 - CEP 18130-971 | SÃO ROQUE/SP | WWW.LATEXSR.COM.BR
E-MAIL: LATEX@LATEXSR.COM.BR | FONE: (11) 4713.5000 / FAX: (11) 4712.5276