

Ficha Técnica - SANRO MEDFEEL



Descrição

Luva confeccionada em látex de borracha natural, interior acabamento interno com leve adição de pó bioabsorvível e palma com superfície texturizada e antiderrapante. Punhos com bordas. Estéril

Atributos

Luvas de látex de 100% borracha natural e levemente lubrificadas com pó bioabsorvível de amido de milho. Superfície Texturizada e antiderrapante. Esterilizadas pelo processo Raio Gama cobalto 60 e validade 3 anos. Ótima sensibilidade tátil, maleabilidade, resistência, segurança e facilidade no calçamento.

Aplicações

Indicada como proteção das mãos do usuário e do paciente em área médico-hospitalar, principalmente em cirurgias.

Especificações Gerais

Modelo	SANRO MEDFEEL
Material	Látex Natural
Acabamento Na Palma	Texturizada
Acabamento Interno	Leve adição de pó
Formato	Anatômico
Cor	Natural
Comprimento	28 cm
Espessura	0,24 mm
Esterilização	Estéril

Tamanhos disponíveis e códigos

Tamanho	Código	EAN	DUN 14
6.0	387940002	7896243126385	17896243126382
6.5	388940002	7896243126392	17896243126399
7.0	389940002	7896243126408	17896243126405
7.5	390940002	7896243126415	17896243126412
8.0	391940002	7896243126422	17896243126429
8.5	392940002	7896243151448	17896243151445

Embalagem

embalada individualmente
caixa com 200 pares

Certificação

CA	38848
CAD. ANVISA	10170489006
RESP. TÉCNICO	ANGELINA M.C.L. MEDINA
CRQ	4.110.366
ICEPEX	Nº CE-LVL/ICEPEX-N 00024-05-2

Ficha Técnica - SANRO MEDFEEL



INSTRUÇÕES DE USO:

Para abrir a embalagem externa de forma asséptica, de cima para baixo, seguindo as setas indicativas contidas na embalagem;
Abrir o envelope interno (papel grau cirúrgico), desdobrando com as pontas dos dedos;
Pegar pela face interna uma das luvas e vestir a mão oposta;
Com a mão ainda despida, pegar a outra luva também pelo punho e enfiar os dedos das mãos já calçadas na dobra do punho, e pela face palmar, calçar a outra mão;
Com ambas as mãos calçadas, ajustar as luvas. Primeiro ajustando os dedos e depois cobrir o avental cirúrgico com o punho da própria luva, ajustando a virola.

CONSERVAÇÃO DO PRODUTO:

Proteja este produto do calor, umidade e luz.

CUIDADOS:

Produto de uso único / destruir após o uso / proibido reprocessar

Observações

Validade: 3 anos da data de fabricação enquanto a embalagem não for aberta danificada ou molhada.

Atenção: Este produto contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.



**FÁBRICA DE ARTEFATOS
DE LÁTEX SÃO ROQUE LTDA.**

MATRIZ: Av. 3 de Maio, 307 - São Roque/SP - CEP 18134-000 - CNPJ: 70.939.574/0001-05

FILIAL: Rua Horácio Manley Lane, 440 - Área 1 - Bairro Marmeleiro - São Roque/SP

CEP 18131-770 - CNPJ: 70.939.574/0002-96

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

www.luvassanro.com.br

e-mail: latex@latexsr.com.br

0800 721 8505 / Fone: (11) 4713-5000

Caixa Postal: 1750 - CEP: 18130-971 - São Roque/SP

Para maiores informações, consulte o nosso site: www.luvassanro.com.br





SEPARE AS ABAS E PUXE PARA ABRIR

luva cirúrgica
Medfeel
PRODUTO DE USO ÚNICO | DESTILAR APÓS O USO | PROIBIDO REPROCESSAR

LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX DE BORRACHA NATURAL

ESTÉRIL - LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL
SUPERFÍCIE TEXTURIZADA - FORMATO ANATÔMICO - DEDOS CURVOS

TAM.:	7.0 INT 2
REFERÊNCIA:	389940002
FAB. / EST. EM:	05/2020
LOTE:	130201
CÓD. BARRAS:	

CONTÉM
1
LUA



C.A. 38.848 - CAD. ANVISA Nº 10170489006 - RESP TÉCNICO: ANGELINA M.T. MEDINA - CRO 04.110.366

ESTERILIZADA PELO PROCESSO RAIO GAMA COBALTO 60 - A VALIDADE E ESTERILIDADE DESTES PRODUTOS ESTÃO ASSEGURADAS POR 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, ENQUANTO A EMBALAGEM NÃO FOR ABERTA. DANIFICADA OU MOLHADA, APÓS CALÇADA, REMOVER O EXCESSO DE PÓ BIOABSORVÍVEL COM UMA TOALHA ESTÉRIL UMEDECIDA. **CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ.**

ATENÇÃO: ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL. SEU USO PODE CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS AO LÁTEX.

FÁBRICA DE ARTEFATOS DE LÁTEX SÃO ROQUE LTDA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

MATRIZ
AV. 3 DE MAIO, 307
SÃO ROQUE / SP - CEP 18134-000
CNPJ 70.939.574/0001-05

FILIAL
RUA HORÁCIO MANLEY LANE, 440 - ÁREA 1
B. MARMELEIRO - SÃO ROQUE/SP - CEP 18131-770
CNPJ 70.939.574/0002-96

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800-7218505
CAIXA POSTAL: 1750 - CEP 18130-971 | SÃO ROQUE/SP | WWW.LATEXSR.COM.BR
E-MAIL: LATEXSR@LATEXSR.COM.BR | FONE (11) 4713-5000
FAX (11) 4712-5274