

Ficha Técnica - AMBI ESTÉRIL



Descrição

Luva confeccionada em látex de borracha natural, interior acabamento interno com pó bioabsorvível e palma com superfície lisa. Punhos com bordas. Estéril

Atributos

Luvas de látex de 100% borracha natural e lubrificadas com pó bioabsorvível de amido de milho. Superfície lisa. Esterilizadas pelo processo Raio Gama cobalto 60 e validade 3 anos. Ótima sensibilidade tátil, maleabilidade, resistência, segurança e facilidade no calçamento.

Aplicações

Indicada para ser utilizada nas mais diversas áreas e profissões, sendo recomendada principalmente para procedimentos não cirúrgicos, como anestesia, manipulação de instrumentos, laboratórios de análise, procedimentos odontológicos e outros que necessitem de proteção estéril ao usuário e ao paciente

Especificações Gerais

Modelo	AMBI ESTÉRIL
Material	Látex Natural
Acabamento Na Palma	Superfície Lisa
Acabamento Interno	Com pó
Formato	Ambidestro
Cor	Leitosa
Comprimento	27 cm
Espessura	0,210 mm
Esterilização	Estéril

Tamanhos disponíveis e códigos

Tamanho	Código	EAN	DUN 14
P	381850002	7896243103614	17896243103635
M	382850002	7896243103621	17896243103628
G	383850002	7896243103638	17896243103611

Embalagem

embalada individualmente



caixa com 200 pares

Certificação

CA	39851
CAD. ANVISA	101704800017
RESP. TÉCNICO	ANGELINA M.C.L. MEDINA
CRQ	4.110.366
IFBQ	03997-4/2017



Ficha Técnica - AMBI ESTÉRIL



INSTRUÇÕES DE USO:

Para abrir a embalagem externa de forma asséptica, de cima para baixo, seguindo as setas indicativas contidas na embalagem;
Abrir o envelope interno (papel grau cirúrgico), desdobrando com as pontas dos dedos;
Pegar pela face interna uma das luvas e vestir a mão oposta;
Com a mão ainda despida, pegar a outra luva também pelo punho e enfiar os dedos das mãos já calçadas na dobra do punho, e pela face palmar, calçar a outra mão;
Com ambas as mãos calçadas, ajustar as luvas. Primeiro ajustando os dedos e depois cobrir o avental cirúrgico com o punho da própria luva, ajustando a virola;
Após calçada, remover o excesso de pó bioabsorvível com uma toalha estéril umedecida.

CONSERVAÇÃO DO PRODUTO:

Proteja este produto do calor, umidade e luz.

CUIDADOS:

Produto de uso único / destruir após o uso / proibido reprocessar

Observações

Validade: 3 anos da data de fabricação enquanto a embalagem não for aberta danificada ou molhada.

Atenção: Este produto contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.



**FÁBRICA DE ARTEFATOS
DE LÁTEX SÃO ROQUE LTDA.**

MATRIZ: Av. 3 de Maio, 307 - São Roque/SP - CEP 18134-000 - CNPJ: 70.939.574/0001-05

FILIAL: Rua Horácio Manley Lane, 440 - Área 1 - Bairro Marmeleiro - São Roque/SP
CEP 18131-770 - CNPJ: 70.939.574/0002-96

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

www.luvassanro.com.br

e-mail: latex@latexsr.com.br

0800 721 8505 / Fone: (11) 4713-5000

Caixa Postal: 1750 - CEP: 18130-971 - São Roque/SP



Para maiores informações, consulte o nosso site: www.luvassanro.com.br