

## Ficha Técnica - SANRO MEDFEEL POWDERFREE



### Descrição

Luva confeccionada em látex de borracha natural, interior acabamento interno isento de pó bioabsorvível e palma com superfície Texturizada e antiderrapante. Punhos com bordas. Estéril

### Atributos

Luvas de látex de 100% borracha natural e revestidas de polímero sintético, isentas de pó bioabsorvível. Superfície Texturizada e antiderrapante Esterilizadas pelo processo Raio Gama cobalto 60 e validade 3 anos. Ótima sensibilidade tátil, maleabilidade, resistência, segurança e facilidade no calçamento.

### Aplicações

Indicada como proteção das mãos do usuário e do paciente em área médico-hospitalar, principalmente em cirurgias.

### Especificações Gerais

Modelo	MEDFEEL PF
Material	Látex Natural
Acabamento Na Palma	Texturizada
Acabamento Interno	Isenta de pó
Formato	Anatômico
Cor	Natural
Comprimento	28 cm
Espessura	0,18 mm
Esterilização	Estéril

### Tamanhos disponíveis e códigos

Tamanho	Código	EAN	DUN 14
6.0	387950002	7896243126439	17896243126436
6.5	388950002	7896243126446	17896243126443
7.0	389950002	7896243126453	17896243126450
7.5	390950002	7896243126460	17896243126467
8.0	391950002	7896243126477	17896243126474

### Embalagem

embalada individualmente



caixa com 200 pares

### Certificação

CA	38847
CAD. ANVISA	10170489007
RESP. TÉCNICO	ANGELINA M.C.L. MEDINA
CRQ	4.110.366
IFBQ	03997-6/2017



## Ficha Técnica - SANRO MEDFEEL POWDERFREE



### INSTRUÇÕES DE USO:

Para abrir a embalagem externa de forma asséptica, de cima para baixo, seguindo as setas indicativas contidas na embalagem;  
Abrir o envelope interno (papel grau cirúrgico), desdobrando com as pontas dos dedos;  
Pegar pela face interna uma das luvas e vestir a mão oposta;  
Com a mão ainda despida, pegar a outra luva também pelo punho e enfiar os dedos das mãos já calçadas na dobra do punho, e pela face palmar, calçar a outra mão;  
Com ambas as mãos calçadas, ajustar as luvas. Primeiro ajeitando os dedos e depois cobrir o avental cirúrgico com o punho da própria luva, ajustando a virola.

### CONSERVAÇÃO DO PRODUTO:

Proteja este produto do calor, umidade e luz.

### CUIDADOS:

Produto de uso único / destruir após o uso / proibido reprocessar

## Observações

Validade: 3 anos da data de fabricação enquanto a embalagem não for aberta danificada ou molhada.

Atenção: Este produto contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.



**FÁBRICA DE ARTEFATOS  
DE LÁTEX SÃO ROQUE LTDA.**

**MATRIZ:** Av. 3 de Maio, 307 - São Roque/SP - CEP 18134-000 - CNPJ: 70.939.574/0001-05

**FILIAL:** Rua Horácio Manley Lane, 440 - Área 1 - Bairro Marmeleiro - São Roque/SP  
CEP 18131-770 - CNPJ: 70.939.574/0002-96

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**

**www.luvassanro.com.br**

**e-mail: latex@latexsr.com.br**

0800 721 8505 / Fone: (11) 4713-5000

Caixa Postal: 1750 - CEP: 18130-971 - São Roque/SP



**Para maiores informações, consulte o nosso site: [www.luvassanro.com.br](http://www.luvassanro.com.br)**