

## Ficha Técnica - AMBI ESTÉRIL



### Descrição

Luva confeccionada em látex de borracha natural, interior acabamento interno com leve adição de pó bioabsorvível e palma com superfície lisa. Punhos com bordas. Estéril

### Atributos

Luvax de látex de 100% borracha natural e levemente lubrificadas com pó bioabsorvível de amido de milho. Superfície lisa. Esterilizadas pelo processo Raio Gama cobalto 60 e validade 3 anos. Ótima sensibilidade tátil, maleabilidade, resistência, segurança e facilidade no calçamento.

### Aplicações

Indicada para ser utilizada nas mais diversas áreas e profissões, sendo recomendada principalmente para procedimentos não cirúrgicos, como anestesia, manipulação de instrumentos, laboratórios de análise, procedimentos odontológicos e outros que necessitem de proteção estéril ao usuário e ao paciente

### Especificações Gerais

Modelo	AMBI ESTÉRIL
Material	Látex Natural
Acabamento Na Palma	Superfície Lisa
Acabamento Interno	Leve adição de pó
Formato	Ambidestro
Cor	Leitosa
Comprimento	27 cm
Espessura	0,210 mm
Esterilização	Estéril

### Tamanhos disponíveis e códigos

Tamanho	Código	EAN	DUN 14
P	381850002	7896243103614	17896243103635
M	382850002	7896243103621	17896243103628
G	383850002	7896243103638	17896243103611

### Embalagem

embalada individualmente



caixa com 200 pares

### Certificação

CA	39851
CAD. ANVISA	10170480017
RESP. TÉCNICO	ANGELINA M.C.L. MEDINA
CRQ	4.110.366
IFBQ	08956-4/2021

## Ficha Técnica - AMBI ESTÉRIL



### INSTRUÇÕES DE USO:

Para abrir a embalagem externa de forma asséptica, de cima para baixo, seguindo as setas indicativas contidas na embalagem;

Abrir o envelope interno (papel grau cirúrgico), desdobrando com as pontas dos dedos;

Pegar pela face interna uma das luvas e vestir a mão oposta;

Com a mão ainda despida, pegar a outra luva também pelo punho e enfiar os dedos das mãos já calçadas na dobra do punho, e pela face palmar, calçar a outra mão;

Com ambas as mãos calçadas, ajustar as luvas. Primeiro ajustando os dedos e depois cobrir o avental cirúrgico com o punho da própria luva, ajustando a virola.

### CONSERVAÇÃO DO PRODUTO:

Proteja este produto do calor, umidade e luz.

### CUIDADOS:

Produto de uso único / destruir após o uso / proibido reprocessar

## Observações

Validade: 3 anos da data de fabricação enquanto a embalagem não for aberta danificada ou molhada.

Atenção: Este produto contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.



**FÁBRICA DE ARTEFATOS  
DE LÁTEX SÃO ROQUE LTDA.**

**MATRIZ:** Av. 3 de Maio, 307 - São Roque/SP - CEP 18134-000 - CNPJ: 70.939.574/0001-05

**FILIAL:** Rua Horácio Manley Lane, 440 - Área 1 - Bairro Marmeleiro - São Roque/SP  
CEP 18131-770 - CNPJ: 70.939.574/0002-96

#### **ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**

**www.luvassanro.com.br**

**e-mail: latex@latexsr.com.br**

0800 721 8505 / Fone: (11) 4713-5000

Caixa Postal: 1750 - CEP: 18130-971 - São Roque/SP

**Para maiores informações, consulte o nosso site: [www.luvassanro.com.br](http://www.luvassanro.com.br)**



SEPARE AS ABAS E PUXE PARA ABRIR

**Ambi**ESTÉRIL

100% látex natural

100% esterilizado

100% sem pó

**LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS  
DE LÁTEX DE BORRACHA NATURAL**  
ESTÉRIS - LUBRIFICADAS COM PO BIODIGERÍVEL,  
SUPERFÍCIE LISA - AMBIDOSTER

Quantidade: \_\_\_\_\_  
Tamanho: \_\_\_\_\_  
Linha: \_\_\_\_\_  
Lote: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE  
**1**

Indicação: para procedimentos não cirúrgicos em áreas de baixa contaminação, como: exame físico, curativos, procedimentos de enfermagem, etc. Não deve ser utilizado em procedimentos de alta contaminação, como: procedimentos cirúrgicos, procedimentos de diagnóstico por imagem, etc.

**SAÚDE E SEGURANÇA**     

Atenção: este produto contém látex de borracha natural. Pessoas com alergia a látex não devem utilizar este produto.

**FÁBRICA DE ARTIGOS DE LÁTEX SÃO ROQUE S.A.**  
Indústria Saneável

**SÃO ROQUE** Rua São João, 1000 - Jd. São João - São Roque - SP - 13400-000  
**SAO PAULO** Rua São João, 1000 - Jd. São João - São Roque - SP - 13400-000



Atendimento ao cliente: 0800-0000000  
E-mail: atendimento@sanro.com.br