Ficha Técnica - SANRO MEDFEEL POWDERFREE



Descrição

Luva confeccionada em látex de borracha natural, interior acabamento interno isento de pó bioabsorvível e palma com superfície Texturizada e antiderrapante. Punhos com bordas. Estéril

Atributos

Luvas de látex de 100% borracha natural e revestidas de polímero sintético, isentas de рó bioabsorvível. Superfície Texturizada e antiderrapante Esterilizadas pelo processo Raio Gama cobalto 60 e validade 3 anos. Ótima sensibilidade tátil. maleabilidade, resistência, segurança facilidade calçamento.

Aplicações

Indicada como proteção das mãos do usuário e do paciente em área médico-hospitalar, principalmente em cirurgias.

Especificações Gerais

Modelo	MEDFEEL PF		
Material	Látex Natural		
Acabamento Na Palma	Texturizada		
Acabamento Interno	Isenta de pó		
Formato	Anatômico		
Cor	Natural		
Comprimento	28 cm		
Espessura	0,18 mm		
Esterilização	Estéril		

Tamanhos disponíveis e códigos

Tamanho	Código	EAN	DUN 14
6.0	387950002	7896243126439	17896243126436
6.5	388950002	7896243126446	17896243126443
7.0	389950002	7896243126453	17896243126450
7.5	390950002	7896243126460	17896243126467
8.0	391950002	7896243126477	17896243126474
8.5	392950002	7896243151455	17896243151442
Embalagem		embalada ind	ividualmente

caixa com 200 pares

Certificação

Embalagem

CA	38847
CAD. ANVISA	10170489007
RESP. TÉCNICO	ANGELINA M.C.L. MEDINA
CRQ	4.110.366
IFBQ	08956-06/2021

Ficha Técnica - SANRO MEDFEEL POWDERFREE



INSTRUÇÕES DE USO:

Para abrir a embalagem externa de forma asséptica, de cima para baixo, seguindo as setas indicativas contidas na embalagem;

Abrir o envelope interno (papel grau cirúrgico), desdobrando com as pontas dos dedos; Pegar pela face interna uma das luvas e vestir a mão oposta;

Com a mão ainda despida, pegar a outra luva também pelo punho e enfiar os dedos das mãos já calçadas na dobra do punho, e pela face palmar, calçar a outra mão;

Com ambas as mãos calçadas, ajustar as luvas. Primeiro ajeitando os dedos e depois cobrir o avental cirúrgico com o punho da própria luva, ajustando a virola.

CONSERVAÇÃO DO PRODUTO:

Proteja este produto do calor, umidade e luz.

CUIDADOS:

Produto de uso único / destruir após o uso / proibido reprocessar

Observações

Validade: 3 anos da data de fabricação enquanto a embalagem não for aberta danificada ou molhada.

Atenção: Este produto contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.



MATRIZ: Av. 3 de Maio, 307 - São Roque/SP - CEP 18134-000 - CNPJ: 70.939.574/0001-05 FILIAL: Rua Horácio Manley Lane, 440 - Área 1 - Bairro Marmeleiro - São Roque/SP CEP 18131-770 - CNPJ: 70.939.574/0002-96

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR www.luvassanro.com.br e-mail: latex@latexsr.com.br 0800 721 8505 / Fone: (11) 4713-5000

Caixa Postal: 1750 – CEP: 18130-971 – São Roque/SP

Para maiores informações, consulte o nosso site: www.luvassanro.com.br



CONTEM

SEPARE AS ABAS E PUXE PARA ABRIR



LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX **DE BORRACHA NATURAL**

ESTÉRIL - ISENTA DE PÓ - SUPERFÍCIE TEXTURIZADA FORMATO ANATÔMICO - DEDOS CURVOS

TAM.:

7.0 INT

REFERÊNCIA: 389950002
FAB. / EST. EM: 01/2019

018191



C.A. 38.847 - CAD. ANVISA Nº 10170489007 + RESP. TÉCNICO: ANGELINA M.C.L. MEDINA - CRQ 04.110.366

ESTERILIZADA PELO PROCESSO RAIO GAMA COBALTO 60 - A VALIDADE E ESTERILIDADE DESTE PRODUTO ESTÃO ASSEGURADAS POR 03 ANOS, A PARIRA DA DATA DE FABRICAÇÃO, ENQUANTO A EMBALAGEM NÃO FOR ABERIRA DANIFICADA OU MOLI-HADA CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ.







Sistema de Carsalo
LÁTEX DE BORRACHA NATURAL.
SEU USO PODE CAUSAR REAÇÕES
ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS
AO LÁTEX.

FÁBRICA DE ARTEFATOS DE LÁTEX SÃO ROQUE LIDA. INDÚSTRIA BRASILEIRA

MATRIZ FILIAL
AV. 3 DE MAIO, 307
SÃO ROQUE / SP - CEP 18134-000
CNPJ 70.939.574/0001-05

RUA HORÁCIO MANLEY LANE, 440 - ÁREÁ 1
B. MARMELEIRO - SÃO ROQUE/SP - CEP 18131-770
CNPJ 70.939.574/0002-96

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800-7218505
CAIXA POSTAL: 1750 - CEP 18130-971 | SAO ROQUE/SP | WWW.LATEXSR.COM.BR
E-MAIL: LATEX@LATEXSR.COM.BR | FONE (11) 4713.5000
FAX (11) 4712.5274